



BANC DE SANG
I TEIXITS

HTLV I/II, ANTICOSSOS (CMIA, ARCHITECT)

81844

Informació tècnica

Utilitat

Detecció qualitativa d'anticossos enfront als virus limfotròpics de cèl·lules T humanes tipus I (HTLV-I) i tipus II (HTLV-II) en sèrum i plasma humà, incloent mostres recollides *post-mortem* (sense batec cardíac).

La seva determinació és d'utilitat en el diagnòstic de la infecció per HTLV I/II i també com a mètode de cribratge per prevenir la transmissió dels virus HTLV-I/II en receptors de sang, de derivats sanguinis, de cèl·lules, teixits i òrgans.

Mètode

Immunoanàlisis per quimioluminescència de micropartícules (CMIA).

Valors de referència

Els resultats possibles són:

- **HTLV-I/II, Anticossos CMIA:** Reactiu, No reactiu, No valorable.

Algoritme diagnòstic

No aplica

Temps de resposta

2 dies laborables màxim.

Informació sobre l'espècimen

Mostra: Sèrum i/o plasma

HTLV I/II, ANTICOSSOS (CMIA, ARCHITECT)

Tubs: Alíquotes de 1-5 mL, tubs de plasma amb EDTA de potassi, oxalat potàssic, citrat de sodi, ACD, CPD o CPDA-1, heparina de sodi, heparina e liti com anticoagulant i/o tubs de sèrum amb i sense gel separador

Volum mínim imprescindible: 1 mL

Estabilitat:

Mostra d'individu viu:

- A temperatura 15-30 °C: ≤ 3 dies
- En refrigeració 2-8 °C: ≤ 14 dies
- Mostra congelada igual o inferior a -20°C: no especificat, no superar els 6 cicles de congelació/descongelació.

Mostra cadavèrica:

- A temperatura 15-30 °C: ≤ 3 dies
- En refrigeració 2-8 °C: ≤ 7 dies
- Mostra congelada igual o inferior a -20°C: no especificat

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient si es tracta de tubs amb sang total i refrigerats i/o congelats a -20°C si es tracta d'alíquotes de sèrum i/o plasma.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada, inactivada per calor i/o amb contaminació bacteriana evident, mostra insuficient, mostra mal identificada.

Informació administrativa

Codi BST: 81844

Codi antic BST: 0171

Descripció de la prova: HTLV I/II, Anticossos (CMIA, Architect)

Sinònims: anti-HTLV I/II, anti-HTLV 1/2

Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional

Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades [aquí](#).

Perfils

No aplica

Referències

- *Inserts kits test ABBOTT ARCHITECT HTLV-I/II.*
- Test amb marcatge CE d'acord amb la Directiva 98/79/CE