



BANC DE SANG
I TEIXITS

HEPATITIS C, ANTICOSSOS (CMIA, ARCHITECT)

81811

Informació tècnica

Utilitat

Detecció qualitativa d'anticossos enfront al virus de la hepatitis C (anti-VHC) tipus IgG i IgM en sèrum i plasma humà, incloent mostres recollides *post-mortem* (sense batec cardíac).

La seva determinació és d'utilitat en el diagnòstic de la infecció (actual o passada) per virus de la hepatitis C (VHC) i també com a mètode de cribratge per prevenir la transmissió del virus de la hepatitis C en receptors de sang, derivats sanguinis, cèl·lules, teixits i òrgans.

Mètode

Immunoassaig per quimioluminiscència de micropartícules (CMIA).

Valors de referència

Els resultats possibles són:

- **Hepatitis C, Anticossos (CMIA):** Reactiu, No Reactiu, No valorable

Algoritme diagnòstic

No Aplica.

Temps de resposta

2 dies laborables màxim.

Informació sobre l'espècimen

Mostra: Sèrum i/o plasma

HEPATITIS C, ANTICOSSOS (CMIA, ARCHITECT)

Tub: Alíquotes de 1-5 mL, tubs de plasma amb EDTA, heparina sòdica, heparina de liti (PST), citrat sòdic, CPD, CPDA-1 o ACD com anticoagulants i/o tubs de sèrum amb o sense gel separador.

Volum mínim imprescindible: 1 mL

Estabilitat:

Mostra d'individu viu:

- En refrigeració: ≤ 7 dies
- Mostra congelada igual o inferior a -20°C: No especificat, però no superar 6 cicles congelació/descongelació.

Mostra cadavèrica:

- Temperatura entre 15 i 30 °C: ≤ 3 dies
- En refrigeració: ≤ 7 dies
- Mostra congelada igual o inferior a -20°C: No especificat, però no superar 3 cicles congelació/descongelació.

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient si es tracta de tubs amb sang total i refrigerats i/o congelats a -20°C si es tracta d'alíquotes de sèrum i/o plasma.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada, amb lipèmia, inactivada per calor i/o amb contaminació bacteriana evident, mostra insuficient, mostra mal identificada.

Informació administrativa

Codi BST: 81811

Codi BST antic: 0121

Descripció de la prova: Hepatitis C, Anticossos (CMIA, Architect)

Sinònims: Anti-VHC, anticossos Hepatitis C, anti-VHC CMIA, Anti-VHC Architect

Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional

Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades [aquí](#).

Perfils

No aplica.

Referències

- *INSERT REACTIU ARCHITECT Anti- HCV (ABBOTT)*
- Test amb marcatge CE d'acord amb la Directiva 98/79/CE