



BANC DE SANG  
I TEIXITS

## HEPATITIS C, ANTICOSSOS (ECLIA, e801)

80807

### Informació tècnica

#### Utilitat

Detecció qualitativa d'anticossos enfront al virus de la hepatitis C (VHC) en sèrum i plasma humà incloent mostres recollides *post-mortem* (sense batec cardíac).

La seva determinació és d'utilitat en el diagnòstic de la infecció (actual o passada) pel VHC i també com a mètode de cribatge per prevenir la transmissió del virus de la hepatitis C en receptors de sang, de derivats sanguinis, de cèl·lules, teixits i òrgans.

#### Mètode

Immunoassaig per electroquimioluminiscència (ECLIA).

#### Valors de referència

Els resultats possibles són:

- **Hepatitis C, Anticossos (ECLIA)**: Reactiu, No Reactiu, No valorable.

#### Algoritme diagnòstic

En cas de resultat de **Hepatitis C, Anticossos (ECLIA)** reactiu es pot sol·licitar la prova confirmatòria **Hepatitis C, Anticossos IgG. Confirmació per Immunoblot**:

Nom de la prova		Es pot demanar per separat?	Es fa sempre?
80809	Hepatitis C, Anticossos IgG. Confirmació per Immunoblot	Si	No*

\*Sols es realitza sota petició

#### Temps de resposta

2 dies laborables màxim.

## Informació sobre l'espècimen

**Mostra:** Sèrum i/o plasma

**Tubs:** Alíquota de 1-5 mL de plasma amb EDTA, di i tripotàsic, heparina de liti, heparina de sodi, citrat de sodi, ACD, CP2D, CPD o CPDA-1 com anticoagulant i/o tubs de sèrum amb i sense gel separador.

**Volum mínim imprescindible:** 1 mL

### Estabilitat:

Mostra d'individu viu:

- A temperatura ambient: ≤7 dies
- En refrigeració: ≤14 dies
- Mostra congelada igual o inferior a -20°C: 3 mesos (màxim 6 congelacions)

Mostra cadavèrica:

- A temperatura ambient: ≤3 dies
- En refrigeració: ≤7 dies
- Mostra congelada igual o inferior a -20°C: no informat (màxim 3 congelacions)

**Instruccions de transport:** Preferiblement a temperatura ambient i/o refrigerats si es tracta de tubs amb sang total i congelats se es tracta d'alíquotes de sèrum i/o plasma.

**Motiu de rebuig:** Mostra hemolitzada, mostra amb contaminació bacteriana evident, mostra insuficient, mostra mal identificada.

## Informació administrativa

**Codi BST:** 80807

**Descripció de la prova:** Hepatitis C, Anticossos (ECLIA)

**Sinònims:** Anti-VHC, HCV, VHC Cobas

**Secció:** Laboratori de Seguretat Transfusional.

**Tarifa BST:** Consultar les tarifes actualitzades [aquí](#).

### Perfils

No aplica

## Referències

- *Insert test Elecsys anti-HCV II, Cobas (Roche).*