



BANC DE SANG
I TEIXITS

VIH-1/VIH-2, Anticossos, antígen P24 (ECLIA, e801)

80804

Informació tècnica

Utilitat

Detecció qualitativa in vitro de l'antigen p24 del VIH-1 i dels anticossos anti-VIH-1 (incloent el grup O) i anti-VIH-2 en sèrum i plasma humà. La seva determinació és d'utilitat en la identificació dels individus infectats pel VIH i pel cribratge de donants de sang, cèl·lules, teixits o òrgans.

Mètode

Immunoassaig per electroquimioluminiscència (ECLIA).

Valors de referència

Els resultats possibles són:

- **VIH-1/VIH-2, Anticossos /Ag P24 (ECLIA):** Reactiu, No Reactiu, No valorable.

Algoritme diagnòstic

En cas de resultat de **VIH-1/VIH-2, Anticossos /Ag P24 (ECLIA)** reactiu es pot sol·licitar la prova **VIH-1/VIH-2, Anticossos IgG. Confirmació per Immunoblot:**

Codi	Nom de la prova	Es pot demanar per separat?	Es fa sempre?
80806	VIH-1/VIH-2, Anticossos IgG. Confirmació per Immunoblot	Si	No*

* Sols es realitza sota petició.

Temps de resposta

2 dies laborables.

Informació sobre l'espècimen

Mostra: Sèrum i/o plasma

VIH-1/VIH-2, Anticossos; VIH-1, antígen P24 (ECLIA, e801)

Tub: Alíquotes de 1-5 mL, tubs de plasma amb EDTA, di i tri potàssic, heparina de sodi, heparina de liti, citrat de sodi, ACD, CP2D, CPD o CPDA com anticoagulant i/o tubs de sèrum amb i sense gel separador.

Volum mínim imprescindible: 1 mL

Estabilitat:

Mostra d'individu viu:

- A temperatura ambient: ≤7 dies
- En refrigeració: ≤4 setmanes
- Mostra congelada igual o inferior a -20°C: 3 mesos (màxim 5 congelacions)

Mostra cadavèrica:

- A temperatura ambient: ≤3 dies
- En refrigeració: ≤7 dies
- Mostra congelada igual o inferior a -20°C: no informat (màxim 3 congelacions)

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient i/o refrigerats si es tracta de tubs amb sang total i congelats se es tracta d'alíquotes de sèrum i/o plasma.

Motiu de rebuig: Mostra estabilitzada amb azida, mostra hemolitzada, mostra amb contaminació bacteriana evident, mostra insuficient, mostra mal identificada.

Informació administrativa

Codi BST: 80804

Descripció de la prova: VIH-1/VIH-2, Anticossos/Ag P24 (ECLIA, e801)

Sinònims: anti-VIH-1/VIH-2, HIV Duo

Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional

Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades [aquí](#).

Perfils

No aplica

Referències

Insert kit test Elecsys HIV Duo COBAS (Roche)