 <b>BANC DE SANG I TEIXITS</b>	<b>Fenotip Rh c</b>
	<b>0502</b>

## **Informació clínica**

### **Utilitat diagnòstica:**

Aquesta prova s'utilitza per determinar si hi ha o no presència de l'antigen Rh c en eritròcits. Forma part de l'estudi del fenotip eritrocitari. També és útil en el marc de l'estudi de l'especificitat d'anticossos irregulars per demostrar que davant d'una especificitat anti-c, la persona que ha desenvolupat l'anticòs és c negatiu.

### **Mètode:**

Hemaglutinació.

### **Valors de referència**

Els resultats possibles són: Negatiu, Positiu.

En el cas de que el resultat sigui dubtós, degut a una possible variant *RHCE* o transfusions prèvies, s'informa del mateix i s'indica la necessitat de realitzar estudis complementaris per la catalogació inequívoca del fenotip Rhc.

### **Algoritme diagnòstic:**

No aplica.

### **Temps de resposta:**

1 dia.

## **Informació sobre l'espècimen**

**Mostra:** Sang total

**Tub:** Tub EDTA K3 10 ml

**Volum mínim:** 6 ml

**Estabilitat:**

- A temperatura ambient: 2 dies
- En refrigeració: 2 dies

**Instruccions de transport:** Preferiblement a temperatura ambient


**Motiu de rebuig:** Mostra molt hemolitzada

## **Informació administrativa**

**Codi BST:** 0502

**Descripció de la prova:** Fenotip Rh c

**Sinònims:** Rh c

 <b>BANC DE SANG I TEIXITS</b>	<b>Fenotip Rh c</b>
	<b>0502</b>


**Secció:** Immunohematologia

**Tarifa BST:** Consultar les tarifes actualitzades clicant [aquí](#).

**Perfils:**

La prova 0502 *Fenotip Rh c* es realitza dintre dels perfils següents:

<b>Perfil</b>	<b>Proves incloses</b>
Fenotip Rh	0500 Rh D 0501 Rh C 0502 Rh c 0503 Rh E 0504 Rh e
Fenotip extensiu	0500 Rh D 0501 Rh C 0502 Rh c 0503 Rh E 0504 Rh e 0510 Kell 0511 Cellano 0512 Kpa 0513 Kpb 0520 Fya 0521 Fyb 0530 Jka 0531 Jkb 0535 Lua 0536 Lub 0540 Lea 0541 Leb 0545 P1 0550 M 0551 N 0552 S 0553 s
Variants Rh (D)	0009 Grup ABO/Rho(D) 0500 Rh D 0501 Rh C 0502 Rh c 0503 Rh E 0504 Rh e 4921 Anàlisi expressió antígen Rh D 4922 Tipificació molecular Rh D

 <b>BANC DE SANG I TEIXITS</b>	<b>Fenotip Rh c</b>
	<b>0502</b>

### **Referències**

AABB Technical Manual. 19th edition. Editat per MK Fung, AF Eder, SL Spitalnik, CM Westhoff: AABB 2017

### **Qualitat**

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.